



PrepSure®

es un conjunto de tres instrumentos innovadores para la preparación de coronas, diseñados para ayudarle a controlar y confirmar la cantidad de reducción dentaria necesaria y lograr un espacio oclusal perfecto. Con tres galgas específicas, PrepSure lleva sus preparaciones de coronas al siguiente nivel, garantizando mayor precisión, confianza y eficiencia en cada caso.

Estos instrumentos son fundamentales para mejorar la precisión y la eficiencia en la preparación de coronas.

- Elimina por completo las conjeturas.
- Evita una reducción insuficiente o excesiva de la estructura dentaria.
- Evita tener que repetir la impresión o el escaneado digital.
- Resuelve un problema habitual en la preparación de coronas.
- Un complemento ideal para su flujo de trabajo digital.
- Autoclavable.

Consiga una preparación dentaria rápida y fiable con PrepSure, un instrumento que garantiza un espacio oclusal preciso para coronas y otras restauraciones protésicas.

PrepSure garantiza que cada preparación cumpla con los requisitos específicos del material utilizado, minimizando errores y mejorando los resultados clínicos. PrepSure es duradero, preciso e imprescindible en los flujos de trabajo modernos de coronas, y le ayuda a evitar una reducción insuficiente o excesiva en todos los materiales de restauración.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Indica y confirma el espacio necesario para la reducción dentaria en coronas y otras restauraciones protésicas.
- Compatible con múltiples materiales protésicos.



Video:
Guía Clínica de Directa -
Cómo Usar - PrepSure



Para más información, escanee
este código QR con su móvil o
visite www.directadental.com

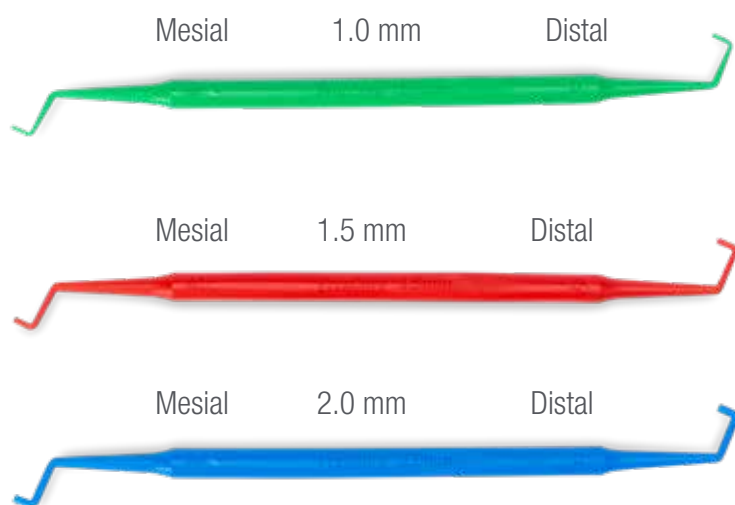

N.º prod. 92403 **Descripción del producto**
PrepSure Assorted Set
(1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm), 3 uds.

N.º prod. 92410 **Descripción del producto**
PrepSure Single 1.0 mm verde, 1 ud.
92413 PrepSure 1.0 mm Set verde, 3 uds.

N.º prod. 92415 **Descripción del producto**
PrepSure Single 1.5 mm rojo, 1 ud.
92418 PrepSure 1.5mm Set rojo, 3 uds.

N.º prod. 92420 **Descripción del producto**
PrepSure Single 2.0 mm azul, 1 ud.
92423 PrepSure 2.0 mm Set azul, 3 uds.

PrepSure, Guía de preparación

Tipo de restauración	Material	Espacio oclusal necesario*
Corona completa	Metal completo / Oro	1,0- 1,5 mm
Corona completa	PFM (porcelana fundida sobre metal)	Functional cusp 1,5-2,0 mm Non functional cusp 1,0- 1,5 mm
Corona completa	Zirconio monolítico	1,0-1,5 mm
Corona completa	Zirconio monolítico	1,5-2,0 mm
Corona completa	Disilicato de litio	1,5-2,0 mm
Corona completa	Porcelana feldespática	≥ 2,0 mm
Corona completa	Corona de composite (resina compuesta)	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Metal/ Oro	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Cerámica/ Disilicato de litio	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Zirconio	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Porcelana feldespática	≥ 2,0 mm
Inlay / Onlay	Composite	1,0-1,5 mm

*Nota:

Las situaciones clínicas pueden variar y pueden requerir ajustes del espacio oclusal recomendado para los distintos materiales. El contexto clínico debe tenerse siempre en cuenta a la hora de determinar el espacio oclusal necesario. Los fabricantes especifican los requisitos de reducción oclusal; por ello, los dentistas deben verificar estos requisitos con antelación.



La punta M confirma el espacio en la mitad mesial



La punta D confirma el espacio en la mitad distal

Para cualquier información adicional,
póngase en contacto con:

Anne Graf Cache
Area Sales Manager, Belgium, France, Spain, Portugal
tel. +33 (0)7 67 30 71 38
anne.graf.cache@directadental.com