



PrepSure®

är en uppsättning av tre innovativa sondliknande instrument som hjälper dig att kontrollera ocklusalt utrymme vid kronpreparation. Med tre olika instrument tar PrepSure dina kronpreparationer till nästa nivå och säkerställer hög precision, trygghet och effektivitet vid varje kronpreparation.

Med PrepSure kan du arbeta snabbare och säkrare med högre precision, samtidigt som risken för under- eller överpreparation minimeras.

- Eliminerar osäkerhet och gissningar vid kronpreparation.
- Minskar risken för över eller under preparation och hjälper dig att bevara så mycket frisk tandsubstans som möjligt.
- Autoklaverbar.
- Löser en av de vanligaste utmaningarna vid kronpreparation.
- Ett värdefullt komplement till ditt digitala arbetsflöde.
- Förhindrar behovet av ett nytt avtryck eller en ny digital skanning.

PrepSure ger dig bättre kontroll över den ocklusala reduktionen vid kronpreparation. Med PrepSure säkerställer du rätt utrymme för det valda protetiska materialet och minskar risken för över- eller underpreparation, vilket hjälper dig att bevara så mycket frisk tandsubstans som möjligt. Resultatet är ökad precision och mer förutsägbara kliniska resultat.

NYCKELFUNKTIONER


- Visar och bekräftar det utrymme för tandreduktion som krävs för kronor och andra protetiska konstruktioner.
- Kompatibel med flera olika protetiska material.



Video:
PrepSure Clinical Guide



För mer information, skanna
QR-koden med din mobil eller
besök www.directadental.com

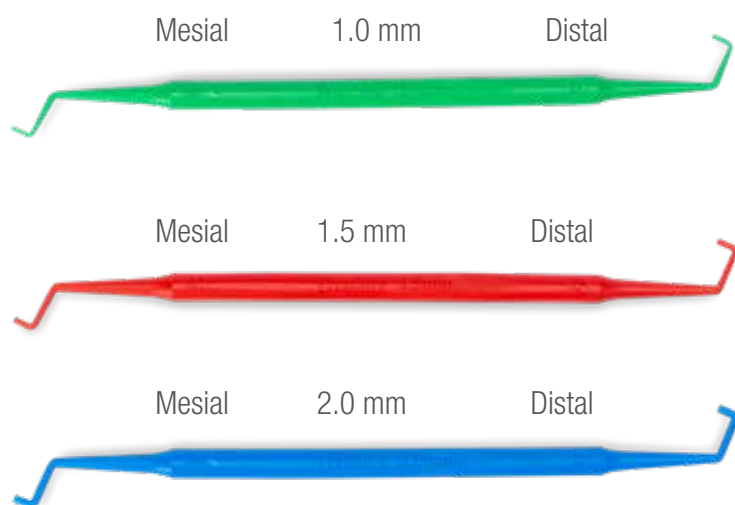

Prod.nr 92403
Produktbeskrivning PrepSure Assorted Set (1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm), 3 st

Prod.nr 92410
Produktbeskrivning PrepSure Single 1.0 mm grön, 1 st
92413 PrepSure 1.0 mm grön Set, 3 st

Prod.nr 92415
Produktbeskrivning PrepSure Single 1.5 mm röd, 1 st
92418 PrepSure 1.5mm röd Set, 3 st

Prod.nr 92420
Produktbeskrivning PrepSure Single 2.0 mm blå, 1 st
92423 PrepSure 2.0 mm blå Set, 3 st

PrepSure, Crown Prep Guide

Restaureringstyp	Material	Erforderligt ocklusalt utrymme
Helkrona	Helmetall/ Guld	1,0- 1,5 mm
Helkrona	PFM (porslin sammansmält med metall)	Funktionell cusp: 1,5-2,0 mm Icke-funktionell cusp: 1,0- 1,5 mm
Helkrona	Monolitisk zirkonia	1,0-1,5 mm
Helkrona	Skiktad zirkonia	1,5-2,0 mm
Helkrona	Litiumdisilikat	1,5-2,0 mm
Helkrona	Fältspatporslin	≥ 2,0 mm
Helkrona	Kompositkrona (resinkomposit)	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Metall/ Guld	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Keramik/ Litiumdisilikat	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Zirkonia	1,0-1,5 mm
Inlay / Onlay	Fältspatporslin	≥ 2,0 mm
Inlay / Onlay	Resinkomposit	1,0-1,5 mm



M-spetsen bekräftar utrymmet i den mesiala halvan



D-spetsen bekräftar utrymmet i den distala halvan

Obs:

Kliniska situationer kan variera och kan kräva justeringar av det rekommenderade ocklusala utrymmet för olika material.

Det kliniska sammanhanget måste alltid beaktas vid fastställandet av erforderligt ocklusalt utrymme.

Tillverkare anger krav på ocklusal reduktion; tandläkare bör därför verifiera dessa krav i förväg.